
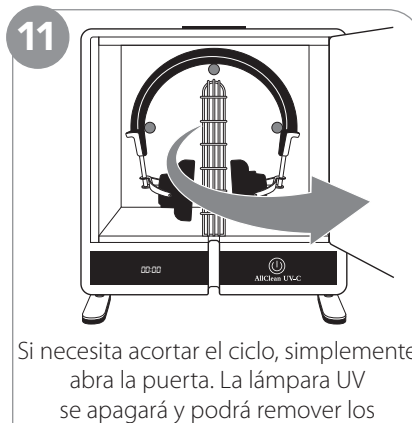
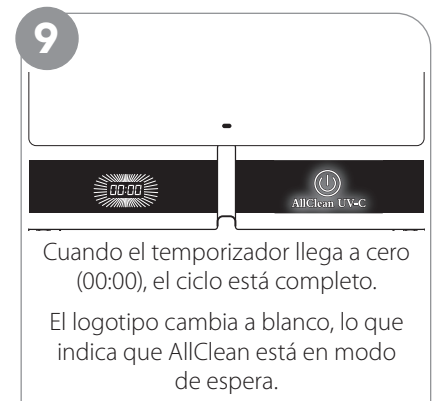
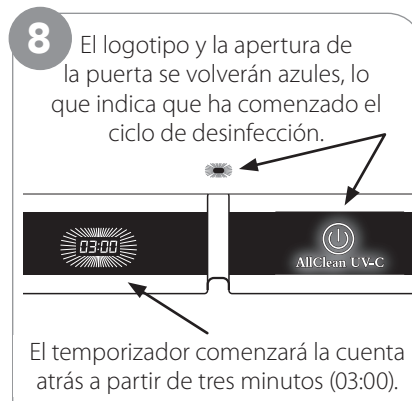
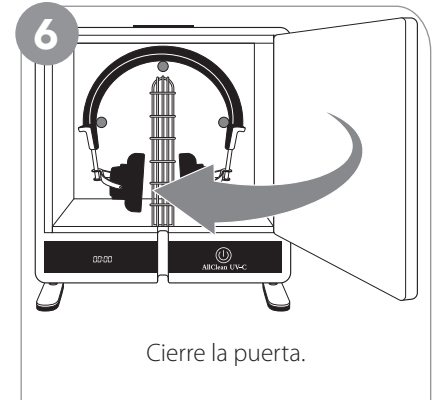
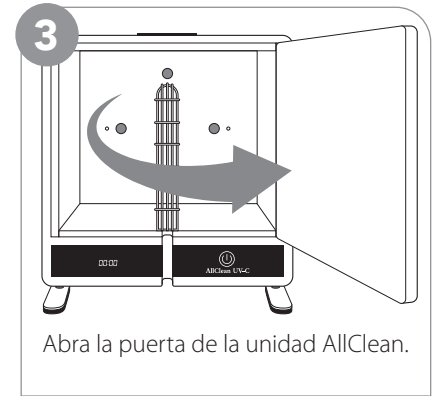
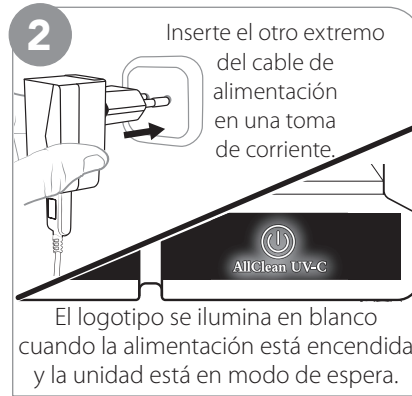


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

para modelos PORTÁTIL y MONTAJE EN PARED

Las ilustraciones muestran el modelo portátil




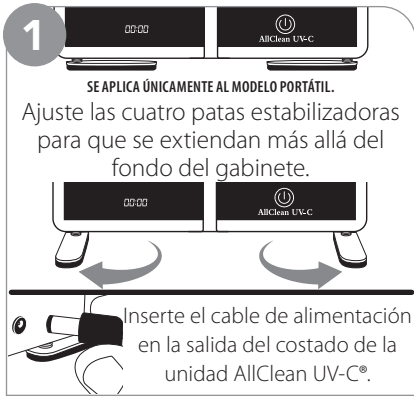


Instrucciones para la instalación del MONTAJE EN PARED en el reverso



+31407602111

info@dryandstore.com

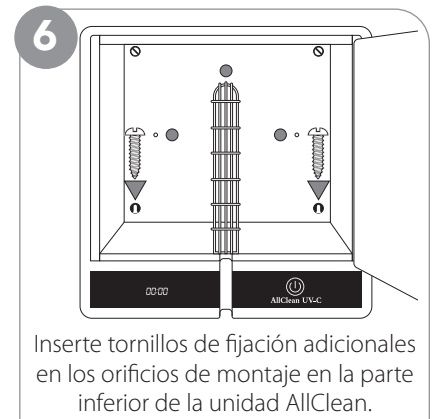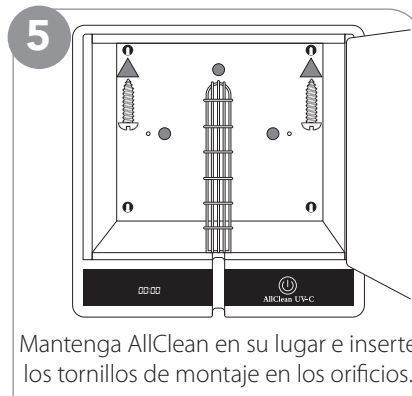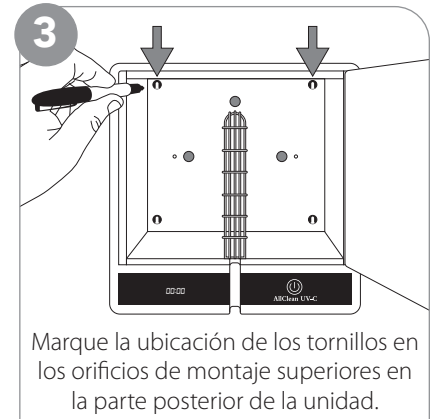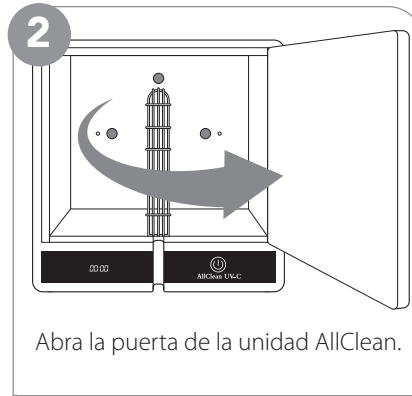

CÓMO UTILIZAR: GUÍA DE INICIO RÁPIDO en el reverso

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo se tarda en desinfectar?

Cada ciclo dura un total de 3 minutos. Hay un temporizador de cuenta regresiva digital, por lo que puede ver cuánto tiempo queda en el ciclo.

¿Cuál es la tasa de muerte?

La lámpara UV-C mata aproximadamente el 99,8% de las bacterias, gérmenes y virus comunes.

¿Cuál es la garantía?

Ofrecemos una garantía limitada del fabricante de 1 año.

¿Qué otros elementos puedo poner en este dispositivo?

AllClean UV-C fue creado para audífonos y equipos audiométricos, pero como es un desinfectante UV-C, puede usarse en cualquier artículo que quepa dentro del gabinete.



+31407602111

info@dryandstore.com



+31407602111

info@dryandstore.com

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, que incluyen:

PELIGRO: para reducir el riesgo de electrocución:

- No lo use mientras se baña.
- No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse o ser arrastrado a una tina o fregadero.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido
- No intente alcanzar este dispositivo si se ha caído al agua.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas:

- **NUNCA mire la luz ultravioleta cuando está encendida. Mirar la luz ultravioleta a simple vista puede causar quemaduras graves en los ojos.**
- Supervise de cerca el uso por parte de niños o inválidos o cerca de ellos.
- Utilice este producto solo para el uso previsto, como se describe en esta guía.
- Nunca opere este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado o se ha caído al agua. Devuélvalo al lugar de compra o al centro de servicio para que lo examinen y reparen.
- Nunca coloque el producto sobre una superficie blanda como una cama. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y similares.
- No lo use al aire libre.
- El adaptador de CA incluido con su unidad está hecho específicamente para este producto. No lo use con otro aparato y no use un adaptador de ningún otro dispositivo eléctrico en su lugar.

NOTA: Este producto no está diseñado para diagnosticar, prevenir, monitorear, tratar o aliviar enfermedades.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Funciona a una temperatura ambiente de 21 °C.

La lámpara UV se apagará si se abre la puerta durante el ciclo de desinfección. La lámpara también se apaga al final del ciclo de 3 minutos.

Póngase en contacto con el establecimiento donde obtuvo su AllClean.



Información de la fuente de alimentación:
ENTRADA: 100-240V 50/60 Hz, 1.5 A SALIDA: 24 V 2000mA

Las fuentes de alimentación utilizadas con este producto están certificadas por UL. Consulte la etiqueta en la fuente de alimentación adjunta para obtener certificaciones.

MODELOS ALLCLEAN UV-C
PORTÁTIL: AC-H10P-E MONTAJE EN PARED: AC-H10W-E

© ALLCLEAN UV-C TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. PATENTES MUNDIALES EN EARTECH.COM/PATENTS

DISEÑADO POR EAR TECHNOLOGY CORP. EN ESTADOS UNIDOS. HECHO EN CHINA.