
# GUÍA DE INICIO RÁPIDO para modelos PORTÁTIL y MONTAJE EN PARED

Las ilustraciones muestran el modelo portátil








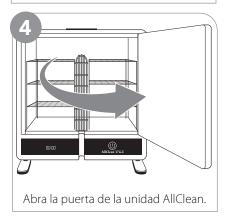






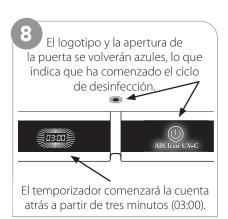



remover los anteojos\*. \*Si el ciclo no se completó, no se desinfectarán por completo.



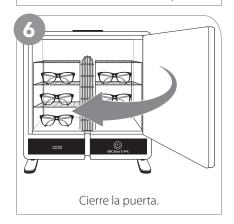



Instrucciones para la instalación del MONTAJE EN PARED en el reverso




+31407602111


info@dryandstore.com

## AllClean UV-C® ÓPTICA

## Instalación de MONTAJE EN PARED




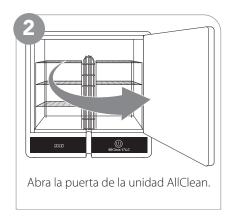


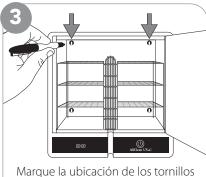

en los orificios de montaje superiores en la parte posterior de la unidad.



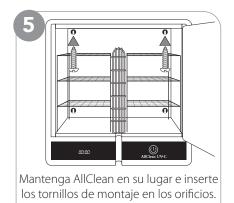

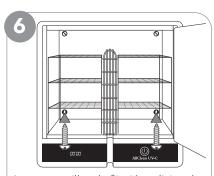

Inserte tornillos de fijación adicionales en los orificios de montaje en la parte inferior de la unidad AllClean.

### CÓMO UTILIZAR: GUÍA DE INICIO RÁPIDO en el reverso

## **Preguntas frecuentes**

### ¿Cuánto tiempo se tarda en desinfectar?

Cada ciclo dura un total de 3 minutos. Hay un temporizador de cuenta regresiva digital, por lo que puede ver cuánto tiempo queda en el ciclo.

#### ¿Cuál es la tasa de muerte?

La lámpara UV-C mata aproximadamente el 99,8% de las bacterias, gérmenes y virus comunes.

Ofrecemos una garantía limitada del fabricante de 1 año

#### ¿Qué otros elementos puedo poner en este dispositivo?

AllClean UV-C fue creado para anteojos, pero como es un desinfectante UV-C, puede usarse en cualquier artículo que quepa dentro del gabinete.











ENTRADA: 100-240V 50/60 Hz, 1.5 A SALIDA: 24 V 2000mA

Las fuentes de alimentación utilizadas con este producto están certificadas por UL. Consulte la etiqueta en la fuente de alimentación adjunta para obtener certificaciones.

MODELOS ALLCLEAN UV-C PORTÁTIL: AC-H10P-E MONTAJE EN PARED: AC-H10W-E

©ALLCLEAN UV-CTODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. PATENTES MUNDIALES EN EARTECH.COM/PATENTS DISEÑADO POR EAR TECHNOLOGY CORP. EN ESTADOS UNIDOS. HECHO EN CHINA

Cual es la garantia?

+31407602111 info@dryandstore.com



**ÓPTICA** 

+31407602111

info@dryandstore.com

#### INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, que incluyen:

**PELIGRO:** para reducir el riesgo de electrocución:

- No lo use mientras se baña.
- No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse o ser arrastrado a una tina o fregadero.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido
- No intente alcanzar este dispositivo si se ha caído al agua.

ADVERTENCIA: Opara reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas:

- NUNCA mire la luz ultravioleta cuando está encendida. Mirar la luz ultravioleta a simple vista puede causar quemaduras graves en los ojos.
- Supervise de cerca el uso por parte de niños o inválidos o cerca de ellos.
- Utilice este producto solo para el uso previsto, como se describe en esta guía.
- Nunca opere este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado o se ha caído al agua. Devuélvalo al lugar de compra o al centro de servicio para que lo examinen v reparen
- Nunca coloque el producto sobre una superficie blanda como una cama. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y similares.
- No lo use al aire libre.
- El adaptador de CA incluido con su unidad está hecho específicamente para este producto. No lo use con otro aparato y no use un adaptador de ningún otro dispositivo eléctrico en su lugar.

NOTA: Este producto no está diseñado para diagnosticar, prevenir, monitorear, tratar o aliviar enfermedades.

### **CONDICIONES DE OPERACIÓN**

Funciona a una temperatura ambiente de 21 ° C.

La lámpara UV se apagará si se abre la puerta durante el ciclo de desinfección. La lámpara también se apaga al final del ciclo de 3

Póngase en contacto con el establecimiento donde obtuvo su AllClean.